



SENSETIO

Základní informace pro použití Sensetio měřicího zařízení.

Zařízení zapnete jeho nasazením na prsty (ukazováček a prostředníček) na prostřední články prstů. Zařízení okamžitě začne snímat elektrodermální aktivitu těla.

Při měření jej můžete nasadit na ruku, zaháknout za jakoukoli gumičku nebo mít jen položeno na stole.

Upevnění gumiček na prstech by mělo být pevné, aby nevznikal volný prostor mezi prsty a vodivými ploškami. Nesmí však být ani příliš utažené, aby docházelo k normálnímu prokrvení prstů.

Pokud je zařízení zapnuté, pak bliká LED dioda modře a můžete jej vyhledat v aplikaci Sensetio GO. V případě, že je vybité, tak nebliká a aplikace jej nevyhledá.

Ujistěte se, že mobilní či jiné zařízení, na kterém používáte aplikaci Sensetio GO má zapnutý Bluetooth.

Před měřením se vždy ujistěte, že máte k aplikaci Sensetio GO zařízení připojeno (ikonka v pravém horním rohu).

Při dokončení měření zařízení nemusíte vypínat, jakmile ztratí kontakt s prsty, tak se po určité době samo vypne.

Nabíjení probíhá pomocí jakéhokoli USB-C kabelu, kterým se nabíjí dnes již téměř každý chytrý telefon. Kabel není především z ekologických důvodů součástí balení.

Vaše Sensetio